

Instrukcja pobrania i przesłania materiału do badania **ParoCheck**

Pobranie materiału:

Wymaz pojedynczy

Zestaw służący do pobierania materiału do badania zawiera łącznie 4 kolorowe pojemniczki (rys. 1), które umożliwiają pobranie wymazów z 4 różnych kieszonek przyzębnych. Specyfika tego badania zapewnia określenie bakterii znajdujących się w czterech różnych kieszonkach przyzębnych, a co za tym idzie określenie ryzyka utraty przyczepu łącznotkankowego w 4 określonych miejscach.


W tym przypadku należy odpowiednie sączi umieścić w 4 różnych pojemniczkach i zaznaczyć na formularzu zlecenia (rys. 6).

Wymaz mieszany

W celu przeprowadzenia badania próbki mieszanej należy pobrany materiał z jednej lub kilku kieszonek przyzębnych umieścić w jednym pojemniku. Ten wariant badania służy do określenia średniej ilości badanych bakterii występujących w kieszonkach przyzębnych i umożliwia oszacowanie ogólnego poziomu ryzyka przyczepu łącznotkankowego. Na formularzu zlecenia należy zaznaczyć wybrany wariant badania (rys. 6).

Po osuszeniu powierzchni zęba i dziąsła należy tamponem odizolować miejsce, z którego zostanie pobrany materiał. Sterylne sączi bibułowe (rys. 1) należy wprowadzić do dna kieszonki przyzębnej i pozostawić przez 15 sekund (rys. 3). W zależności od wymazu (pojedynczego lub mieszanego), sączi bibułowe należy pojedynczo (rys. 4), bądź razem umieścić w oznakowanych pojemniczkach (rys. 5).

Maksymalny czas dostarczenia materiału do badania od momentu pobrania to 10 dni. Do czasu wysyłki materiał należy przechowywać w lodówce (2-8°C).

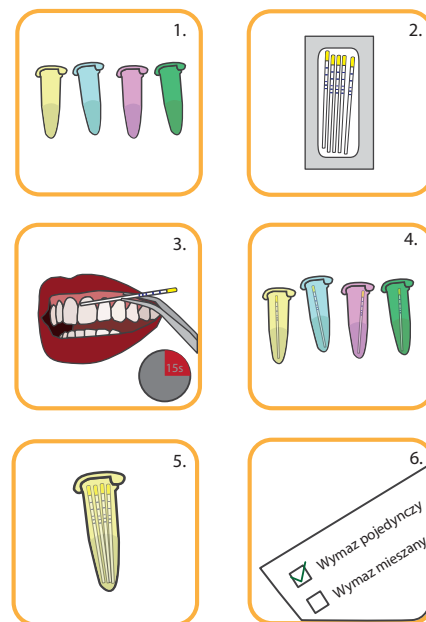

Przesłanie materiału:

- Próbkę pobranego materiału należy umieścić w kartonie i przesłać do:

**Institut für Mikroökologie,
Auf den Lüppen 8,
35745 Herborn, Niemcy.**

Materiał do badania należy wysłać na początku tygodnia (poniedziałek-środa) pocztą polską, wersja priorytetowa kosztuje ok. 40,00PLN.

- Do przesyłki należy dołączać wypełnione zlecenie na badanie. Zlecenie może być wypełnione zarówno przez lekarza, jak i pacjenta.
- Wpłatę należy dokonać na następujący numer konta: Santander Bank Polska S.A. 44 1500 1054 1210 5006 7879 0000. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty, badania zostaną wstrzymane do momentu uiszczenia przez pacjenta należnej kwoty.

Dodatkowe koszty związane ze zrealizowaniem badania:

15 zł - wysyłka wydrukowanego wyniku na adres Pacjenta

120 zł - pełen pakiet - w tym: odbiór próbki materiału do badań przez kuriera DHL Medical* i przesłanie jej na adres Instytutu Mikroekologii w Poznaniu oraz wysyłka wydrukowanego wyniku na podany przez Pacjenta adres.

* Instrukcja postępowania przy wykupieniu opcji wysyłki próbki kurierem DHL Medical:

- wypełnij wniosek dołączony do przesłanego opakowania,
- wypełniony wniosek odeślij na adres md.pl@dhl.com (obsługiwany od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17).
- w odpowiedzi otrzymasz maila z informacją o numerze zlecenia oraz terminie realizacji odbioru przesyłki.
- wypełnij także list przewozowy dołączony do zamówionych opakowań (dane nadawcy).

UWAGA: sprawdź czy już nie dokonałeś opłaty za powyższe usługi na wcześniejszym etapie zamówienia.

Zleceniodawcy/pacjenci, osoby pobierające i transportujące materiał biologiczny ponoszą pełną odpowiedzialność za wszystkie etapy pobrania i transportu materiału biologicznego, do momentu dostarczenia do Instytutu Mikroekologii.

Opakowanie materiału jest zgodne z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) oraz instrukcją pakowania P650.