

INSTRUKCJA POBRANIA I PRZESŁANIA MATERIAŁU – WYMAZ Z JAMY USTNEJ DO BADANIA MYKOLOGICZNEGO

Pobranie materiału

1. Materiał należy pobrać rano przed posiłkiem i przed wykonaniem zabiegów higienicznych.
2. We wczesnej fazie choroby, bezwzględnie przed podjęciem leczenia.
3. Należy sprawdzić stan błon śluzowych jamy ustnej, jeżeli obserwujemy zaczerwienienia, nadżerki, białawy nalot należy pobrać wymazy z miejsc zmienionych chorobowo.
4. Protezy, dostawki uzębienia należy wyjąć poprzedniego dnia wieczorem przed wykonaniem higieny jamy ustnej.
5. Materiał do badań pobierać wykonując ruchy w górę i w dół pocierając wacikiem wymazówki o zmienioną chorobowo powierzchnię.
6. Wymazówkę niezwłocznie umieścić w dołączonej do zestawu probówce z podłożem transportowym. Opisać próbkę danymi pacjenta, pozwalającymi na jego jednoznaczną identyfikację.
7. Zabezpieczoną wymazówkę należy zamknąć w woreczku ochronnym.

Zabezpieczony materiał umieścić wraz z uzupełnionym zleceniem w kartoniku zestawu pobraniowego i dostarczyć do nas wysyłkowo lub osobiście. W przypadku badań opłaconych bezpośrednio na konto bankowe Instytutu (z pominięciem sklepu internetowego) dołączyć również potwierdzenie płatności.



Maksymalny czas dostarczenia materiału do laboratorium Instytutu Mikrobiologii w Poznaniu przy ul. Sielskiej 6 od pobrania to **48 h**



Od pobrania do czasu transportu przechowuj materiał w szczelnym i suchym miejscu.

Przesłanie materiału

Wyślij przesyłkę z materiałem na początku tygodnia (poniedziałek-środa) na adres:

Instytut Mikrobiologii
Ul. Sielska 6
60-129 Poznań

Opłaciłaś/-eś pakiet z odbiorem Twojego materiału przez kuriera medycznego?

Sprawdź dołączoną do Twojego zestawu instrukcję przygotowania próbki do wysyłki oraz zamówienia kuriera medycznego.

Zleceniodawcy/pacjenci, osoby pobierające i transportujące materiał biologiczny ponoszą pełną odpowiedzialność za wszystkie etapy pobrania i transportu materiału biologicznego, do momentu dostarczenia do Instytutu Mikrobiologii. Opakowanie materiału jest zgodne z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) oraz instrukcją pakowania P650.

