


INSTRUKCJA POBRANIA I PRZESŁANIA MATERIAŁU DO BADANIA – Mikrobiota jelit PLUS

Pobranie materiału




Przygotuj zestaw pobraniowy Instytutu Mikrobiologii. W zestawie znajdują się: kałopapacz (papierowy przylepić na deskę), duża kałówka z brązową nakrętką oraz probówka z płynem i dołączoną osobno wymazówką. Wyjmij wszystkie akcesoria z woreczka i przygotuj do użycia w miejscu wypróżnienia.

Kałopapacz przymocuj do deski sedesowej i rozciągnij nad toaletą (możesz też użyć folii streczkowej). Na tak zabezpieczoną toaletę, wypróżnij się w standardowy sposób. Zadbaj jedynie o to, by pobierany kał nie miał styczności z moczem ani toaletą.

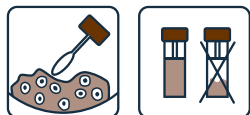

Do dużej kałówki z brązową nakrętką pobierz kał z 8 różnych miejsc do badania mikrobioty i markerów stanu jelit. Umieść materiał tak by wypełnić ją do poziomu 3/4 objętości kałówki, nie pozostawiając pustych przestrzeni.

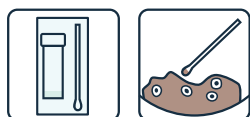

Następnie otwórz opakowanie foliowe z wymazówką i probówką z płynem do oznaczeń pasożytów metodą PCR, przytrzymując oburącz końce i pociągnij za przeciwległe boki.

Pobierz próbkę poprzez 3-4 krotne zanurzenie jej w kale. Ilość kału powinna odpowiadać wielkości małego ziarna groszku/ w przypadku kału płynnego wymazówka powinna być brązowa.



Otwórz probówkę i umieść w niej wymazówkę z pobranym materiałem tak, by zanurzyła się w płynnym podłożu. Nie wolno wylewać podłoża. Lekko dociskając wymazówkę do wewnętrznej ścianki probówki złam ją (miejsce złamania jest lekko nacięte, co ułatwia tę czynność).



Wyrzucić pozostałą po złamaniu część trzonka wymazówki, jednocześnie pozostawiając zabrudzoną kałem część wymazówki w probówce. Zakręcić mocno probówkę i wstrząsnij nią tak, by kał z wymazówki został wypłukany do płynnego podłoża w probówce.



Pobrany materiał włóż do woreczka i zaklej. Wypełnij dokładnie zlecenie badania, wpisz na nim datę i godzinę pobrania materiału. Tak zabezpieczony materiał umieść wraz z uzupełnionym zleceniem w kartoniku zestawu pobraniowego i dostarcz do nas **wysyłkowo lub osobiście**.



Maksymalny czas dostarczenia materiału do laboratorium Instytutu Mikrobiologii w Poznaniu przy ul. Sielskiej 6 od pobrania to:

- 48h** – dla badania Mikrobiota jelit Plus, pasożytów jelitowych, patogenów jelitowych, kalprotektyny, zonuliny, laktoferyny, sigA, antygen *Helicobacter pylori*, M2-PK z krwią utajoną.
- 72h** – dla badania Mikrobiota jelit Complete, Pro, Basic, Screen, posiew ilościowy *Candida* i grzyby pleśniowe, posiew półilościowy *Candida*, *Clostridioides (Clostridium) difficile* + toksyna A/B.

Jeżeli jednocześnie wykonujesz kilka badań, pamiętaj o zachowaniu najkrótszego czasu dostarczenia materiału. Wszystkie badania, które chcesz wykonać, zaznacz na zleceniu.

Jeśli dostarczasz materiał za pośrednictwem Oddziału Instytutu w Warszawie lub placówki partnerskiej, zadbaj o to, by dotarł on tam na początku tygodnia, maksymalnie w ciągu 24h od pobrania.



Od pobrania do czasu transportu przechowuj materiał w warunkach chłodniczych (2-8°C). Dla materiałów biologicznych wymagających chłodzenia również podczas transportu dostarczamy wkłady chłodzące. W takich przypadkach próbkę podczas transportu należy zabezpieczyć z wykorzystaniem dostarczonych wkładów chłodzących, uprzednio schłodzonych w zamrażarce przez minimum 6 godzin. Zadbaj o to, by wkłady chłodzące nie dotykały bezpośrednio woreczka z pojemnikiem z materiałem. W tym celu użyj dostarczonej folii termoizolacyjnej owijając nią woreczek z próbką. Na dno kartonika włóż 1 wkład chłodzący, następnie próbkę zabezpieczoną folią i kolejny wkład chłodzący.

Przesłanie materiału

Wyślij przesyłkę z materiałem na początku tygodnia (poniedziałek-środa) na adres:
Instytut Mikrobiologii
Ul. Sielska 6
60-129 Poznań

Opłaciłeś/-eś pakiet z odbiorem Twojego materiału przez kuriera przeszkolonego w transporcie materiałów biologicznych?

Sprawdź dołączoną do Twojego zestawu instrukcję przygotowania próbki do wysyłki oraz zamówienia kuriera.

Zleceniodawcy/pacjenci, osoby pobierające i transportujące materiał biologiczny ponoszą pełną odpowiedzialność za wszystkie etapy pobrania i transportu materiału biologicznego, do momentu dostarczenia do Instytutu Mikrobiologii. Opakowanie materiału jest zgodne z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) oraz instrukcją pakowania P650. **Instrukcja pakowania i wysyłki materiału biologicznego dla pacjenta Instytutu Mikrobiologii znajduje się pod adresem <https://instytut-mikroekologii.pl/instrukcja-pakowania-i-wysylki-materialu-biologicznego/>**

